

販売元:株式会社 向日葵
〒460-0002愛知県名古屋市中区
E-mail:info@himmeli.co.jp

唾液専用抗原検査キット使用説明

検査キットがすべて揃っているか確認する。



検査キット
×1



漏斗
×1



チューブ
×1



希釈液
×1




1 漏斗をチューブに
差し込みます。



2 唾液採取する前にリ
ラックスし、頬を指で
15~30秒優しくマッ
サージしてください。
その後、①容器に唾液
を採取します。



3 漏斗を取り、希釈液を
すべてチューブの中
に加え、しっかりとふた
をして、数回振り、唾
液と希釈液が混ぜるよ
うにします。

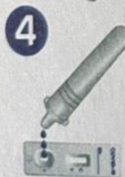

4 検査キットを平ら
な場所に置き、
チューブを優しく
絞って、検体を2~3
滴注入します。



5 注入後15分~20分の間
に結果を確認します。

15~20min

希釈液を注入後、15分~20分の間に結果を確認する。



陽性反応が出たら医療機関・保健所にご相談ください。

【陰性】Cの1本のみラインが現れます。

【陽性】TとCに2本のラインが現れます。PCR検査を受けることを推奨し
ます。

【無効】30分経過してもラインCに赤い色帯が現れない場合、Tの色帯が
濃淡に関係なく、結果は無効とみなされます。検査が無効の場合
は、新しい検査キットを使って改めて検査をする必要があります。）

※現時点では陰性でも、潜伏期間がありますので、健康状態を観察して
再検査を受けることを推奨します。

ご使用上の注意

1. 低温・高温下での使用しないでください。生産日から2年間は本商品
の有効期間となります。
2. 起床直後・食後すぐには使用しないでください。
3. 本商品の使用は1回限りです。
4. 本商品は、使用するまで密封袋で保管してください

注意事項

- ・ 本商品は、医療機器ではなく研究用試薬となります。
- ・ 本商品を用いた検査判定はいかなる意味でも医療診断や治療を目的と
するものではありません。

※一部掲載されている商品の画像と実際の商品とはデザイン・仕様が一
部異なる場合があります。

販売元:株式会社 向日葵

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内3-17-24 NAYUTA BLD.9F

E-mail: info@himawari-nagoya.com

ホームページ: www.himawari-nagoya.com